

TechFilter es un sistema de filtrado automático de temblor para ratones de ordenador. El dispositivo TechFilter para puerto USB permite conectar un ratón USB al ordenador, junto con un pulsador externo opcional.

Advertencias:

Por favor, lea detalladamente las siguientes advertencias antes de utilizar su TechFilter.

Cuando desconecte un cable, tire del conector, nunca tire del cable porque puede dañarse. Por precaución, no utilice este producto cerca del agua y no lo sitúe en una superficie húmeda.

Este producto ha sido diseñado conforme a las normas aplicables sobre EMC (compatibilidad electromagnética) y seguridad. Este producto presenta el marcado CE de conformidad con las Directivas Europeas exigibles, y garantiza su funcionamiento correcto en entornos domésticos, comerciales y de oficina.

Este producto no necesita conectarse a la red eléctrica, ni dispone de pilas o baterías. Respete las conexiones descritas en el apartado Instalación.

Instalación:

Siga los siguientes pasos para comenzar a utilizar su TechFilter:

- 1.** Localice un conector USB libre, en la parte trasera o delantera de su ordenador.
- 2.** Conecte el dispositivo TechFilter a su ordenador mediante el cable negro USB. No conecte todavía el ratón USB al dispositivo TechFilter.
- 3.** La primera vez que instale el dispositivo, se cargará automáticamente el controlador USB para el ratón. Usted no necesita instalar ningún CD o programa manualmente. Tras unos

segundos, el dispositivo ya se encontrará instalado. Para indicar un correcto funcionamiento el puntero del ratón se moverá en círculos.

4. Conecte el ratón USB al dispositivo TechFilter en el conector rectangular situado en un lateral del dispositivo.

5. Puede dejar conectado el dispositivo de manera permanente, o conectarlo y desconectarlo cuando lo necesite, incluso con el ordenador encendido.

6. Si dispone de un pulsador externo opcional, puede conectarlo al dispositivo TechFilter, junto al ratón. Al detectar un pulsador externo, el dispositivo TechFilter desactivará los botones del ratón para facilitar su uso.

7. Si tras conectar el ratón, éste no responde y el puntero sigue moviéndose en círculos, trate de desconectar y volver a conectar el sistema. Esto puede ser necesario en algunos sistemas.

Garantía:

El dispositivo TechFilter se entrega conjuntamente con una garantía de funcionamiento de dos años de acuerdo a la legislación vigente en España. Para la ejecución de dicha garantía será preciso aportar justificante de compra o factura. La garantía se entiende global y afecta a materiales, recambios y mano de obra.